

Area where no text nor important information/artwork should appear

Forbidden area dedicated to the batch number printing

SMALLEST TEXT SIZE : **8pts**, for one colour text and text with reserved color.

QR CODES : no limitation as far as the standards are respected, and as far as they are made of 100% black color.

FRONT SIDE

159

18

5

18

5

6

40

25

25

208

HALEON

Otribebe

Nazal Aspiratör ve Yedek Uç (Yumuşak)
Bebek, Yenidoğan ve Çocuklar İçin
OTRİBEBE Nazal Aspiratör
Bebek, Yenidoğan ve Çocuklar İçin:
OTRİBEBE Nazal Aspiratör'ü kullanmadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz.
Bu ürün kullanımıyla ilgili sorularınız varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışın.

1. OTRİBEBE Nazal Aspiratör nedir ve ne için kullanılır?
OTRİBEBE Nazal Aspiratör ve Yedek Uç, rahatsız edici burun salgılarını burundan nazikçe uzaklaştırarak çocuğunun burnunun temizlenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bebeğinizin burnu tıkanığında, gereken sıklıkta özellikle de bebeğinizi beslemeden ve bebeğinizin uykuya dalmadan önce, nazal aspirasyon önerilmektedir. Kolay ve hijyenik bir kullanıma sahip olan OTRİBEBE Nazal Aspiratör, bebeğinizin normal şekilde nefes almasına, yemek yemesine ve uyumasına yardımcı olur ve tekrar daha iyi hissetmesine sağlar. Burun salgılarının burundan uzaklaştırılması, kulak enfeksiyonları (otitis), sinüs enfeksiyonları (sinüzit) ya da öksürük gibi ilave komplikasyonların da önlenmesine yardımcı olmaktadır. OTRİBEBE Nazal Aspiratör kullanımı ayrıca genel soğuk algınlığı durumlarında bebeğinizin uykuyu kalitesini artırır.
Ayrıca OTRİBEBE Nazal Aspiratör'ü, OTRİBEBE Monodoz gibi bir serum fizyolojik çözelti ya da bir deniz suyu çözeltisinden sonra da kullanabilirsiniz. Bu işlem bebeğinizin burun salgılarını uzaklaştırmayı kolaylaştırır ve burun tıkanıklığını açar.
OTRİBEBE Nazal Aspiratör'den kimler faydalanabilir?
Burnunu kendi başına temizleyemeyen bebek, yenidoğan ve çocuklarda kullanım için uygundur. Bununla birlikte, yenidoğanlarda kullanmadan önce tıbbi tavsiye alınmalıdır.
OTRİBEBE Nazal Aspiratör kim tarafından uygulanmalı?
Güvenlik nedeniyle OTRİBEBE Nazal Aspiratör, kullanma talimatını okuyup anlayabilen, ağız, burun, kulak ve gözleri ayırt edebilen ve temel hijyen kavramlarını anlayabilen ebeveyn ya da bakıcı tarafından kullanılmalıdır.
OTRİBEBE Nazal Aspiratör, 2 adet tek kullanımlık OTRİBEBE Nazal Aspiratör Yumuşak Yedek Uç içerir. Yumuşak yedek uçların her biri, filtredeki mucusu bloke ederek hijyen sağlayan bir emici filtre içerir. Tek kullanımlık yumuşak yedek uçlar ayrıca 10'lu paketler halinde mevcuttur.

2. OTRİBEBE Nazal Aspiratör kullanmadan önce nelere dikkat edilmelidir?
OTRİBEBE Nazal Aspiratör Yedek Uçları sadece OTRİBEBE Nazal Aspiratör ile kullanınız. Bu ürün kişisel kullanım içindir. Burun ameliyatı ya da yaralanması takiben ürünün kullanımı uygun değildir. Ürün dinlenme (sırt üstü yatar) pozisyonunda uygulanmalıdır. Ağızlık dudaklar arasında sıkıca tutulmalıdır. Bu ürüne bağlı yaşanan tüm ciddi istenmeyen olaylar üretici ve sağlık otoritesine raporlanmalıdır.

3. OTRİBEBE Nazal Aspiratör nasıl kullanılır?
Hijyenik nedenler ve kontaminasyondan kaçınmak için, OTRİBEBE Nazal Aspiratör'ün tüm parçalarının uygun şekilde monte edildiğinden ve kullanılmış bir başlık ile birleştirilmediğinden emin olun.

- OTRİBEBE Nazal Aspiratör'ü kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız.
- Bir tek kullanımlık ucu (A) aspiratörün gövdesine (B) yerleştiriniz. Kullanılmış başlıklar tekrar kullanmayınız.
- Ağızlığı (C) ağızınıza (ebeveyn, bakıcı) yerleştiriniz ve aspiratörün ucunu (A) çocuğunun burun deliğine yerleştiriniz. Performansı artırabilmek için diğer burun deliğinin aspirasyon esnasında çok kısa süre kapatılması önerilir.
- Ağızlık (C) kısmını kullanarak yavaş ve düzenli bir şekilde içinize çekiniz (aspirasyon).
- Eğer aspiratör ucu aspirasyon sırasında dolarsa, ucu değiştiriniz. Kullanılmış ucu tekrar kullanmayınız.
- Aynı işlemi diğer burun deliği için de uygulayınız.
- Temizlik talimatları:
Kullanımdan sonra tek kullanımlık ucu (A) çıkarınız ve atınız. Ağızlığın dış yüzeyini (C) ılık suyla temiz ve nemlendirilmiş bir bez kullanarak siliniz ve bir mendille kurulaştırınız. Yalnızca gövdenin içinde mucus veya salgı olması durumunda: gövdeyi (B) plastik borudan ayırınız. Tüpü tekrar takmadan önce gövdeyi (B) ılık suyla yıkayınız ve kurumaya bırakınız. Cihazın kuru olduğundan emin olunuz ve orijinal ambalajında saklayınız. Ellerinizi dikkatlice yıkayınız.

0710009306000170

0710009306000170

0

30 °C

0 °C

0 °C ile 30 °C arasında muhafaza ediniz.

Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra OTRİBEBE Nazal Aspiratör ve Yedek Uç'u kullanmayınız. Orijinal ambalajında muhafaza ediniz. Lütfen ürünü yerel imha prosedürlerine göre imha ediniz ve her zaman çevremizi düşününüz.

4. Güvenliğiniz için
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerde saklayınız. OTRİBEBE Nazal Aspiratör ve Yedek Uçlarını bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık (alerji) durumunda kullanmayınız (6. ilave bilgiler, Bileşimi kısmına bakınız). Kirilmiş ya da hasarlı ürünü, kullanılmış veya hasarlı yedek ucu ya da eksik yedek uçlu veya hasarlı filtrelili ürünü kullanmayınız.

5. OTRİBEBE Nazal Aspiratör ve Yedek Uç saklama koşulları

6. İlave bilgiler
Bileşimi:
Aspiratör: Polypropylene, styrene ethylenebutylene styrene, silicone.
Yedek uçlar: PVC ve melamine foam.
İçerik:
Aspiratör: 1 adet Nazal Aspiratör (aspiratörün gövdesi, B), 1 adet esnek tüp ve ağızlık (C) ve 2 adet tek kullanımlık yedek uç (A).
Yedek uçlar: 10 adet tek kullanımlık yedek uç içerir.

HALEON CH SARL
Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Switzerland

Dağıtıcı: Haleon Tüketici Sağlığı A.Ş.,
Esentepe Mah. Bahar Sk. Özdilek River Plaza Vyndham
Grand No: 13 İç Kapı No: 80 Şişli/İstanbul

info.tr@haleon.com
444 4 083

AB Yetkili Temsilcisi ve AB'deki İthalatçı:
Haleon Medical Devices
Clocherane, Youghal Road Dungarvan,
Co. Waterford, X35 Y983, Ireland

CE **MD** Tıbbi Cihaz
Tarih: Haziran 2023

OTRİBEBE Haleon şirketler grubunun tescilli markasıdır.

BACK SIDE

159

18

9

18

9

208

4. Güvenliğiniz için
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerde saklayınız. OTRİBEBE Nazal Aspiratör ve Yedek Uçlarını bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık (alerji) durumunda kullanmayınız (6. ilave bilgiler, Bileşimi kısmına bakınız). Kirilmiş ya da hasarlı ürünü, kullanılmış veya hasarlı yedek ucu ya da eksik yedek uçlu veya hasarlı filtrelili ürünü kullanmayınız.

5. OTRİBEBE Nazal Aspiratör ve Yedek Uç saklama koşulları

6. İlave bilgiler
Bileşimi:
Aspiratör: Polypropylene, styrene ethylenebutylene styrene, silicone.
Yedek uçlar: PVC ve melamine foam.
İçerik:
Aspiratör: 1 adet Nazal Aspiratör (aspiratörün gövdesi, B), 1 adet esnek tüp ve ağızlık (C) ve 2 adet tek kullanımlık yedek uç (A).
Yedek uçlar: 10 adet tek kullanımlık yedek uç içerir.

HALEON CH SARL
Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Switzerland

Dağıtıcı: Haleon Tüketici Sağlığı A.Ş.,
Esentepe Mah. Bahar Sk. Özdilek River Plaza Vyndham
Grand No: 13 İç Kapı No: 80 Şişli/İstanbul

info.tr@haleon.com
444 4 083

AB Yetkili Temsilcisi ve AB'deki İthalatçı:
Haleon Medical Devices
Clocherane, Youghal Road Dungarvan,
Co. Waterford, X35 Y983, Ireland

CE **MD** Tıbbi Cihaz
Tarih: Haziran 2023

OTRİBEBE Haleon şirketler grubunun tescilli markasıdır.

V2

17 - APR - 2024

Artwork Information Panel

HALEON

Non Production Artwork

Production Artwork

Component No: AWP No:
05N0036 7629351
000170

Total Number of Colours including Varnish & Foils: 1

Manufacturing Site:

STI

(Note: North American Artwork will have N/A in this field)

Approving Market:

Turkey-TUR

Technical Drawing No:

GSK_SPEC_LEAFLET_HARD &
SOFT_AWSPEC_RevD

Material Spec No:

GSK_SPEC_LEAFLET_HARD &
SOFT_AWSPEC_RevD

(Note: North American Artwork will have N/A in this field)

Body Text Size: 8.0pt

Smallest Text Size: 8.0pt

(Note: For North American Artwork, see Regulatory Spec for this information)

Electronic Verification Code:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Black					
7.	8.	9.	10.	11.	12.
Total Special Finishes: 0					

Printer and User notes: